



VascuTape Radiopaque Tape
Instructions for Use-Korean

VascuTape Radiopaque Tape

VascuTape Radiopaque Tape

(모델명: 1109-20, 1108-20, 1102-50, 1102-20, 1102-00, 1100-50, 1100-20, 1100-00)

Instructions for Use - Korean

사용목적

인체 외부에 표시하기 위해 사용하는 기구

사용방법

1. 사용 전 준비사항

사용 전 제품이나 포장을 확인하고 손상이 있는 경우 사용하지 않는다.

2. 조작방법

가. 영상 촬영 전 테이프를 환자의 피부에 부착한다.

나. 원래 부착 위피에서 제거하지 않는 한 다수의 X-ray 영상에서 사용할 수 있다.

다. 최초 사용 후 제거하여 다른 환자나 환자의 다른 신체 부위에 부착해서는 안 된다.

3. 사용 후 관리 방법 및 저장 방법

본 제품은 일회용으로 재사용하지 않는다.

사용 시 주의사항

1. 금기사항

가. 라텍스 프리(Latex-Free) 접착제에 포함된 물질에 알레르기가 있는 환자에게 방사선불투과성(Radiopaque) 테이프 사용을 금한다.

나. 방사선불투과성 테이프를 이식해서는 안된다.

2. 사용환경

가. 방사선 연구소(Radiology lab)

나. 수술실

다. 이 제품은 일회용이며 세척하거나 재멸균 및 재사용해서는 안된다.

3. 제품 요구사항/권장사항

가. 테이프는 정상적인 방사선량 하에서 테이프와 틱 마크(tic marks)를 볼 수 있을 정도로 방사선불투과성(Radiopaque)이 있다.

나. 테이프는 X선 지점에 직각으로 부착한다. 환자의 몸에 감겨 있으면 신체의 곡률로 인해 이미지가 왜곡될 수 있다.

다. 테이프를 제거할 때 환자의 편안함을 위해 과도한 털이 없는 부위에 부착할 것을 권장한다.

*부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)



LeMaitre Ltd.
3F, Suseo Building
281, Gwangpyeong-ro
Gangnam-gu, Seoul
Republic of Korea
Tel +82 2 6956 6405
Fax +82 2 6956 6412