



Syntel® Silicone Over-the-wire Embolectomy Catheter

Instruction for Use-Korean

Syntel® Silicone Over-the-Wire Embolectomy Catheter

Syntel® Silicone Over-the-Wire Embolectomy Catheter

(Model # 모델명: A4E01, A4E02, A4E03, A4E04, A4E05, A4E06, A4E08, A4E09)

Instructions for Use - Korean

사용목적

말초 동맥 시스템에서 혈전 및 색전을 제거하거나 혈관을 폐쇄하거나 혈관에 생리식 염수와 같은 수액 용액등을 주입하는데 사용

사용방법

1. 사용 전의 준비사항

- 가. 각 포장을 검사하고 포장이 개봉되었거나 손상되었다는 증거가 있는 경우 사용하지 마십시오.
 - 나. 팽창시키기 전에 풍선을 완전히 흡인하십시오.
 - 다. 멸균식염수로 풍선을 팽창시키고 누출 여부를 검사하십시오. 만약 풍선 주위에 누출의 흔적이 있거나, 풍선이 팽창된 상태가 유지되지 않거나 또는 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 주의: 과도한 팽창은 풍선 파열의 가능성을 증가시키므로 최대 권장량을 초과하지 마십시오. 최대 팽창 용량은 사양을 참조하십시오.

2. 사용방법

- 가. 카테터 풍선은 멸균된 비입자형(Nonparticulate)의 생리식염수와 같은 혈액에 적합한 수액 또는 CO₂로 팽창되어야 합니다.
- 나. CO₂를 사용하는 경우, 풍선벽(Balloon Wall)을 통한 CO₂ 확산으로 인해 팽창량에 대한 수정이 필요할 수 있습니다.
- 다. 멸균 매체(Sterile Medium)로 카테터와 공가기 통하는 루멘을 세척합니다.
- 라. 권장 주입량은 사양표를 참조합니다.
- 마. 동맥절제술(Arteriotomy) 또는 적절한 유도관(Introducer Sheath)을 통해 카테터를 혈관에 삽입하고 풍선을 폐색물질(Occlusion)을 관통하여 물질의 바로 뒤에(Beyond) 위치시킵니다.
- 바. 멸균 생리식염수와 같은 수액으로(Sterile Medium)로 풍선을 팽창시킵니다. 풍선이 혈관벽(Blood Wall)에 닿는 느낌이 들 때까지 팽창을 계속해야 합니다. 카테터를 회수하는 동안 풍선의 팽창량을 제어하는 민감도 (Sensitivity)는 풍선의 직경을 조정할 수 있도록 하는데 중요합니다. 풍선의 팽창은 혈관벽(Blood Wall)에 대한 저항감과 관련이 있습니다. 저항이 없다면 풍선이 파열된 것으로 가정해야 하며 팽창을 즉시 중단하고 카테터를 회수합니다.
- 사. 카테터를 회수하여 폐색(Occlusion)물질을 제거합니다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- 가. 본 제품은 일회용입니다. 재사용, 재처리 또는 재멸균하지 마십시오.
- 나. 현지 규정에 따라 폐기합니다.

사용 시 주의사항

1. 금기사항

Syntel® Silicone Over-the-Wire Embolectomy Catheter는 동맥내막 절제술 또 는 정맥 시스템 사용을 금합니다.

2. 경고

- 가. 제품 또는 멸균 포장이 훼손된 경우에는 사용하지 마십시오.
- 나. 재사용하지 마십시오. 카테터는 일회용입니다.
- 다. 환자 사용 중에는 풍선을 팽창시키기 위해 공기를 사용하지 마십시오.
- 라. 혈류를 차단하기 위해 필요한 양 이상으로 풍선을 팽창하지 마십시오. 권장된 최대 풍선 팽창 용량을 초과하지 마십시오. (사양 참조)
- 마. 심하게 병든 혈관(Diseased Vessels)을 맞닥뜨렸을 때 주의를 기울이십시오. 날카로운 석회화 플라크(Calcified Plaque)로 인해 동맥 파열 또는 풍선 부전이 발생할 수 있습니다. 카테터 삽입 절차(Catherization Procedure)와 관련된 위험을 고려할 때 풍선 파열 가능성을 고려해야 합니다.
- 사. 카테터 삽입 전에 풍선의 공기를 빼십시오. 저항에 반하여 카테터를 밀거나 당기기 위해 과도한 힘을 사용하지 마십시오.
- 아. 주입하는 수액, 용액 등(Infusion Agents)은 제조업체의 사용 지침에 따라 사용하십시오.

3. 주의사항

- 가. 최대 권장 팽창량을 초과하지 마십시오. (사양표 참조)
- 나. 풍선의 손상을 방지하기 위해 기구로 풍선을 절대 잡지 마십시오.

4. 합병증

모든 카테터 시술과 마찬가지로 합병증이 발생할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있지만 이제 국한되지 않습니다.

- 감염(Infection)
- 국소 혈종(Local hematomas)
- 내분열(Intimal disruption)
- 동맥 박리(Arterial dissection)
- 천공 및 파열(Perforation and rupture)

- 출혈(Hemorrhage)
- 동맥 혈전증(Arterial thrombosis)
 - 혈전 또는 동맥경화 플라크의 말단 색전(Distal emoli of blood clots and arteriosclerotic plaque)
- 공기 색전(Air embolus)
- 동맥류(Aneurysms)
- 동맥 경련(Arterial spasms)
- 동정맥 누공 형성(Arteriovenous fistula formation)
- 파편화 및 말단 색전술로 인한 풍선 파열 또는 팁 분리(Balloon rupture or tip separation with fragmentation and distal embolization)

<사양표>

모델명	카테터 사이즈	최대 액체 용량 (ml)	호환가능 가이드 와이어 (inch)	수축시 호환가능 인트로듀서 쉬스(F)	팽창 풍선 직경 (mm)	CO ₂ 용량 (cc)	팽창 풍선 최대 인장강도 (lbs)	추천 주사기 (cc)
A4E01	5F•40cm	0.15	0.035	6	5	0.3	0.7	1
A4E02	5F•80cm	0.15	0.035	6	5	0.3	0.7	1
A4E03	5F•40cm	0.5	0.035	6	9	1.0	1.5	1
A4E04	5F•80cm	0.5	0.035	6	9	1.0	1.5	1
A4E05	5F•40cm	0.9	0.035	6	11	1.8	2.0	1
A4E06	5F•80cm	0.9	0.035	6	11	1.8	2.0	1
A4E08	5F•80cm	1.4	0.035	6	13	2.8	2.5	3
A4E09	5F•80cm	1.6	0.035	6	14	3.2	3.5	3

*부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)



LeMaitre Ltd.
3F, Suseo Building
281, Gwangpyeong-ro
Gangnam-gu, Seoul
Republic of Korea
Tel +82 2 6956 6405
Fax +82 2 6956 6412

LeMaitre , Syntel are registered trademarks of LeMaitre Vascular, Inc.
©2023 LeMaitre Vascular, Inc. All rights reserved. Printed in the USA.

작성연월 Apr-2025
R4363-01 Rev. B